

SILLA PEDIÁTRICA “PARAGUAS” PLEGABLE PARA NIÑOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O LIMITACIONES MOTORAS

Silla paraguas A01 / A02 / A03 / A04 / A10

Las sillas paraguas han sido diseñadas para ser utilizadas por niños con diversidad funcional o limitaciones motoras con la finalidad exclusiva de transporte, tanto interior como exterior.

Esta silla no es apta para la corrección o el tratamiento de deformidades.

Peso máximo autorizado para el usuario: 50 kg.

Está prohibido el uso de esta silla como asiento dentro de vehículos de transporte.

El uso prolongado de la silla puede causar irritación en la piel del usuario, existe una funda confortable como accesorio.

Sea cuidadoso con el medio ambiente, siga la reglamentación de su municipio para deshacerse de su silla, cuando le deje de ser útil.

Características generales

Respaldo graduable en dos posiciones para A01, A02, A03, A04.

Tapicería realizada en materiales ignífugos según normativa.

Cinturones en zona pélvica y pectoral ajustables.

Reposapiés graduable en varias posiciones.

Varios tamaños progresivos según las medidas del usuario.

Garantía: Según normativa vigente.

La garantía se invalidará si se produjesen daños por el uso inadecuado, manipulación de componentes o por falta de atención necesaria a este manual de uso.

La garantía no cubre los posibles procesos de oxidación en los componentes metálicos de la silla producidos por una exposición prolongada a condiciones no favorables, como alto grado de humedad o salinidad.



Como fabricante ELVIMI, S.L. declara que este producto se ajusta al Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR 2017/745)



INSTRUCCIONES DE USO

DESPLEGADO-PLEGADO

Partiendo de la posición de plegado, liberar el gancho lateral (1) y apoyándose en el lateral de la estructura y los mandos desplegar hasta lo máximo posible sin forzar (2). Seguidamente bloquear el compás de potencia trasero (3) y delantero (4), hasta conseguir desplegar la silla de forma que esté apta para el uso.

Para el plegado de la silla, seguir los pasos anteriores de forma inversa.

En A10, A10/1 y A10/2 no olvidar fijar sistema de bloqueo lateral.



POSICIONES DEL RESPALDO (SÓLO PARA A01, A02, A03, A04).

El respaldo se puede graduar en dos posiciones actuando las piezas correderas laterales (5) hasta sus topes correspondientes.

IMPORTANTE: Asegúrese de que las dos correderas se encuentren bien posicionadas y coincidiendo con las marcas de color.

POSICIONES DEL REPOSAPIES

Sobre el tubo de las ruedas delanteras se encuentran los anclajes laterales (6) para el reposapiés pudiéndose graduar varias alturas dependiendo de la necesidad.

ATENCIÓN: No plegar la silla con el reposapiés anclado.



USO DE LA SILLA

Para transferir al usuario, inmovilizar la silla, bloqueando los frenos, en terreno llano no deslizante e incorporar al usuario hasta el desalajo del asiento.

Para descender o ascender un bordillo o escalón, apoyar todo el peso inclinado hacia detrás sobre las ruedas traseras y avanzar cuidadosamente.


Por seguridad del usuario, se recomienda hacer siempre uso de los cinturones ajustables.

ACCESORIOS

Capota impermeable según tamaño A34.

Funda confortable para asiento y respaldo según tamaño A36.

Bolsa porta objetos

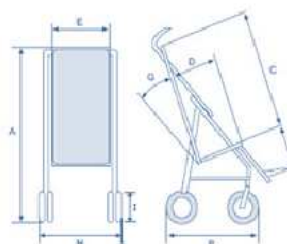

	A01	A02	A03	A04
A	810	1.020	1.020	1.030
B	650	755	740	740
C	505	560	620	820
D	270	300	350	350
E	320	360	400	420
F: min/máx.	250/360	220/280	290/320	310/370
G	95º/120º	90º/115º	90º/100º	90º/100º
H	470	530	570	570
I	175	175	175	175
Kg.	8,4	8,9	10,6	11,5

Medidas en milímetros

SILLA PEDIÁTRICA “PARAGUAS” PLEGABLE PARA NIÑOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O LIMITACIONES MOTORAS

SILLA PARAGUAS A01/A02/A03/A04

ETIQUETA IDENTIFICATIVA UNICA

El número de identificación único está impreso en la etiqueta adhesiva identificativa pegada en una zona del lateral izquierdo de la estructura de la silla de forma visible



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Esta silla no requiere mantenimiento. En caso de defecto o reparación, deberá dirigirse al distribuidor autorizado o punto de venta. No está disponible un manual de asistencia técnica. El único servicio de reparación autorizado es el fabricante. El fabricante facilitará al usuario los repuestos que necesite para la sustitución o reparación de la silla en el caso de que no sea el fabricante el que realice la reparación y sea el usuario u otro el que la realice declinando el fabricante cualquier responsabilidad sobre la misma. Las ruedas solo pueden ser sustituidas por otras de iguales características, material y tamaño.

INFORMACION DE INTERES GENERAL RELACIONADO CON EL USO Y MANEJO DE LA SILLA

La silla debe ser atendida y propulsada siempre por un acompañante suficientemente capacitado para su uso.

Uso del freno: se acciona mediante el movimiento de la palanca de freno hasta que por presión se ajuste bloqueando la rueda

No exponer la silla prolongadamente a fuentes de calor extremas, puede provocar que se aumente la temperatura de la superficie de los materiales. El nivel de resistencia a la combustión de los materiales en conjunto no debe de exceder de una exposición mayor de 60º o acción directa de llama.

La vida útil de la silla está estimada en 5 años dependiendo de las condiciones de uso.

La vida útil de las ruedas está estimada en 3 años dependiendo de las condiciones de uso.

La silla al estar desocupada puede transportarse rodando de la misma forma que estando ocupada o plegada de forma manual.

Es necesario la lectura y entendimiento correcto de este manual para el buen uso de la silla, esto evitara siempre daños o accidentes innecesarios que se puedan producir de forma fortuita

Revisar cada tres meses el estado general de la silla, el uso puede provocar deterioros por desgaste o fatiga de los materiales especialmente los muelles de suspensión, ruedas, frenos y reposapiés metálico

LIMPIEZA

Estructura y tapicería, aplicar agua y jabón neutro.