

SILLA PEDIÁTRICA “NIDO” PLEGABLE PARA NIÑOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O LIMITACIONES MOTORAS

Silla nido A21 / A22 / A23

Las sillas nido han sido diseñadas para ser utilizadas por niños con diversidad funcional o limitaciones motoras con la finalidad exclusiva de transporte, tanto interior como exterior.

Esta silla no es apta para la corrección o el tratamiento de deformidades.

Peso máximo autorizado para el usuario: 50 kg.

Está prohibido el uso de esta silla como asiento dentro de vehículos de transporte.

Para evitar irritaciones y escaras, mantenga siempre el tapizado de la silla limpio y seco.

Sea cuidadoso con el medio ambiente, siga la reglamentación de su municipio para deshacerse de su silla, cuando le deje de ser útil.

Características generales

Respaldo graduable en dos posiciones.

Reposapiés - apoya piernas graduable.

Cinturones en zona pélvica y pectoral ajustables.

Tapicería realizada en materiales ignífugos según normativa.

Tres tamaños progresivos según las medidas del usuario.

Garantía: Según normativa vigente.

La garantía se invalidará si se produjesen daños por el uso inadecuado, manipulación de componentes o por falta de atención necesaria a este manual de uso.

La garantía no cubre los posibles procesos de oxidación en los componentes metálicos de la silla producidos por una exposición prolongada a condiciones no favorables, como alto grado de humedad o salinidad.



Como fabricante ELVIMI, S.L. declara que este producto se ajusta al Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR 2017/745)



INSTRUCCIONES DE USO

POSICIONES DEL RESPALDO

Para fijar el respaldo en su posición más vertical, presione la barra que acciona los compases laterales (1) hasta que el respaldo quede bloqueado, para reclinar el respaldo tire de la barra para desbloquear los compases laterales (1) y coloque el respaldo en su posición más baja.

POSICIONES DEL REPOSAPIES-APOYAPIERNAS

Accionando sobre las manetas laterales (2.1), apretando o aflojando, seleccionaremos la posición en altura del apoya piernas con respecto al suelo. Accionando sobre los pomos laterales (2.2), seleccionaremos la posición en altura del reposapiés con respecto al suelo.

INSTRUCCIONES DE PLEGADO

Partiendo de la posición de uso, procederemos primero a abatir hacia el interior el reposapiés. A continuación, lo posicionaremos en su punto más bajo en altura.

Segundo, liberaremos los dispositivos de bloqueo (3).

Tercero, iniciar el plegado, desplazando el manillar (4) hacia adelante lo máximo posible sin forzar (5).

Para el desplegado seguir los pasos anteriores de forma inversa.

Evite poner sus dedos en los compases laterales, ya que éstos podrían quedar atrapados al reclinarsse el respaldo.

USO DE LA SILLA

Para transferir al usuario, inmovilizar la silla, bloqueando los frenos, en terreno llano no deslizante e incorporar al usuario hasta el desalajo del asiento.


Para descender o ascender un bordillo o escalón, apoyar todo el peso inclinado hacia detrás sobre las ruedas traseras y avanzar cuidadosamente. Asegúrese de que las ruedas traseras se encuentran bien encajadas y aseguradas en su posición de uso (en A22 y A23).

Por seguridad del usuario, se recomienda hacer siempre uso de los cinturones ajustables.



ACCESORIOS

- 1.- Soporte lateral cabeza A30
- 2.- Soporte lateral para dorsal A30
- 3.- Cuña abductora A32
- 4.- Bolsa porta-objetos A33
- 5.- Capota impermeable según tamaño A34
- 6.- Mesa adaptable según tamaño A31

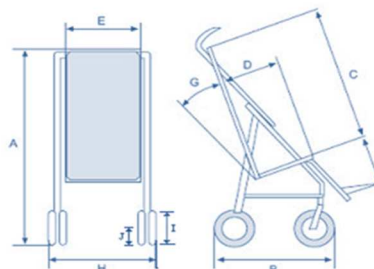

	A01	A02	A03
A	950	1.020	1.080
B	630	650	655
C	590	640	700
D	290	330	380
E	330	355	400
F: min/máx.	30/40	28/42	28/43
G	90º/110	90º/110	90º/110
H	510	580	630
I	315	315	315
J	200	200	200
Kg.	16,0	17,5	18,5

Medidas en milímetros

SILLA PEDIÁTRICA “NIDO” PLEGABLE PARA NIÑOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O LIMITACIONES MOTORAS

Silla nido A21 / A22 / A23

ETIQUETA IDENTIFICATIVA ÚNICA

El número de identificación único está impreso en la etiqueta adhesiva identificativa pegada en una zona del lateral izquierdo de la estructura de la silla de forma visible



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Esta silla no requiere mantenimiento. En caso de defecto o reparación, deberá dirigirse al distribuidor autorizado o punto de venta. No está disponible un manual de asistencia técnica. El único servicio de reparación autorizado es el fabricante. El fabricante facilitará al usuario los repuestos que necesite para la sustitución o reparación de la silla en el caso de que no sea el fabricante el que realice la reparación y sea el usuario u otro el que la realice declinando el fabricante cualquier responsabilidad sobre la misma. Las ruedas solo pueden ser sustituidas por otras de iguales características, material y tamaño.

INFORMACION DE INTERES GENERAL RELACIONADO CON EL USO Y MANEJO DE LA SILLA

La silla debe ser atendida y propulsada siempre por un acompañante suficientemente capacitado para su uso.

Uso del freno: se acciona mediante el movimiento de la palanca de freno hasta que por presión se ajuste bloqueando la rueda.

No exponer la silla prolongadamente a fuentes de calor extremas, puede provocar que se aumente la temperatura de la superficie de los materiales. El nivel de resistencia a la combustión de los materiales en conjunto no debe exceder de una exposición mayor de 60° o acción directa de llama.

La vida útil de la silla está estimada en 5 años dependiendo de las condiciones de uso.

La vida útil de las ruedas está estimada en 3 años dependiendo de las condiciones de uso.

La silla al estar desocupada puede transportarse rodando de la misma forma que estando ocupada o plegada de forma manual.

Es necesario la lectura y entendimiento correcto de este manual para el buen uso de la silla, esto evitara siempre daños o accidentes innecesarios que se puedan producir de forma fortuita.

Revisar cada tres meses el estado general de la silla, el uso puede provocar deterioros por desgaste o fatiga de los materiales especialmente los muelles de suspensión, ruedas, frenos y reposapiés metálico.

LIMPIEZA

Estructura y tapicería, aplicar agua y jabón neutro.

Para limpiarlo se puede extraer el tapizado soltando todas las hebillas y correaje.